



**Littmann®**  
Stethoscopes

リットマン® ステソスコープ  
Littmann® Stethoscope

医師を志す方へ

リットマン® ステソスコープは、50年以上にわたり世界中の多くの  
医療従事者に選ばれ、ご愛用いただいております。  
医師を目指す皆様に、教育現場に、お薦めしたい聴診器です。

リットマン® ステソスコープの詳細情報は  
<https://go.solventum.com/NSCAT>

価格は全て“メーカー希望価格(税込)”です。



# リットマン® カードiology IV™ ステスコープ

Littmann® Cardiology IV™ Stethoscope


## この1器でOSCEにも臨床研修にも使用できます。



### 一体成型ダイアフラム

リムとダイアフラムの段差が少なくお手入れが簡単です。また、低周波と高周波のモード切り替えが可能なサスペンデッドダイアフラムを採用しています。

リットマン® ステスコープのサスペンデッドダイアフラムは、チェストピースを押さえつける力の強弱を調整することで、高低の周波数レンジを聞き分け、特定の音を識別できます。ベル面へ切り替えの際に、チェストピースを皮膚から離し置きなおす必要がなく、効率的に聴診できます。

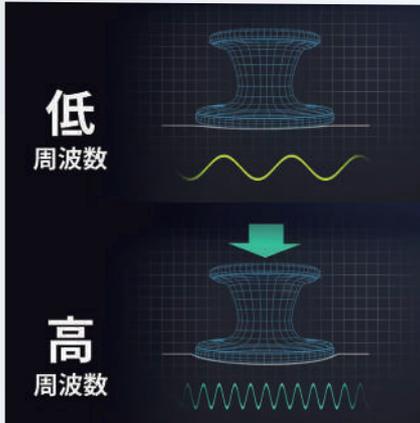

### ソフトシーリング イアーチップ

柔らかく耳穴へフィットし、聴診の妨げとなる周囲のノイズを遮断します。

### イアーチューブ

外耳道に合わせるための最適な角度に固定されています。常に一定の条件で聴診することができます。

### 高感度ツーインワン・ チューブ

チェストピースで捉えた生体音を効率良く忠実に耳まで届ける構造です。しなやかで厚みがあり、外部からの雑音を遮断するので微弱な音もしっかり伝えます。



### 両面に大小のサスペンデッド・ダイアフラムがついた成人・小児 両用タイプ

#### 授業・OSCE時



小児用膜面をノンチルスリーブに交換して、成人用ベル型・膜型として使用が可能です。

ノンチルスリーブは付属品として1器に1つセットされています。肌にあてた時に冷たさを感じさせないノンチル素材を使用しています。

#### 臨床研修時



両面膜型にし、成人用膜面、小児用膜面として使用が可能です。

膜面は、片面で低・高周波音を連続聴診できるサスペンデッド・ダイアフラムが両面についていますので、膜面のままでも成人・小児両用としてご使用いただけます。

# 在学中保証<sup>※</sup>で安心してご使用いただけます。

リットマン<sup>®</sup> ステスコープは、取り扱い説明書による正常なご使用状態で破損した場合には、  
在学中は新品交換・無償パーツ交換させていただきます。

※ 詳細は裏面注記をご確認ください。

## リットマン<sup>®</sup> カーディオロジー IV<sup>™</sup> ステスコープ ラインナップ

### スタンダード



### 黒色加工



### レインボウ加工



### ミラー加工



### シャンパン加工



### ハイポリッシュスモーク加工



## シルク調仕上げシリーズ

まるでシルクのような手触り



髪や肌に  
くっつきにくい



折り畳みやすい  
収納しやすい



汚れにくく  
清掃しやすい



傷つきにくく  
長持ち

特殊コーティングを  
施したチューブを  
採用



# リットマン® カーディオロジー IV™ ステススコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	希望本体価格 (税込)
<b>スタンダード</b> Standard 	シルバー	シルバー	6151	ブラック(ショートレングス) ※1	シルバー	¥44,550
			6152	ブラック ※2		
			6154	ネイビーブルー ※2		
			6155	ハンターグリーン ※2		
			6156	プラム ※2		
			6158	ラズベリー ※2		
			<b>NEW</b> 6187C	ミッドナイトブルー (シルク調仕上げ)	シルバー	
<b>レインボウ加工</b> Rainbow Edition 	レインボウ	ブラック	6165	ブラック	ブラック	¥46,200
		バイオレット	6205	プラム		
<b>黒色加工</b> Black Edition 	ブラック	ブラック	6163	ブラック	ブラック	¥48,510
		ブラック	6168	ネイビーブルー		
		レッド	6200	ブラック		
		ブルー	6201	ブラック		
		バイオレット	6203	ブラック		
		<b>NEW</b> 6186C	アラバスターホワイト (シルク調仕上げ)	ブラック		
<b>ミラー加工</b> Mirror Edition 	ミラー	ミラー	6170	バーガンディー	シルバー	
			6177	ブラック		
<b>シャンパン加工</b> Champagne Edition 	シャンパン	スモーク	6179	ブラック	スモーク	¥48,510
		シャンパン	6176	バーガンディー	ブラック	
		シャンパン	6190	カリビアンブルー	ブラック	
<b>ハイポリッシュ スモーク加工</b> High Polish Smoke Edition 	ハイポリッシュ スモーク	ブルー	6202	ネイビーブルー	ブラック	
		シャンパン	6204	ブラック	ブラック	

全長/重さ:約69cm/約180g(※1:約56cm/約167g、※2:約69cm/約177g)

# リットマン® クラシック III™ ステススコープ



	チェストピース 表面仕上げ	ステム	製品番号	チューブカラー	バイノーラル 金属部表面仕上げ	希望本体価格 (税込)
<b>スタンダード</b> Standard 	シルバー	シルバー	5620	ブラック	シルバー	¥21,450
			5621	グレー		
			5622	ネイビーブルー		
			5623	カリビアンブルー		
			5627	バーガンディー		
			5831	プラム		
			5835	ターコイズ		

全長/重さ:約69cm/約150g

●本カタログに掲載した全製品のカラー写真につきましては、実物と色調が異なる場合があります。●リットマン® ステススコープには天然ゴムラテックスを使用しておりません。●各製品には「添付文書」「取扱説明書(日本語)」「保証書(取扱説明書最終ページ)」が同封されております。●取扱説明書による正常なご使用状態で破損した場合のリットマン® ステススコープの保証期間は、通常購入日から一年間です。学校販売でご購入された場合のみ在学中保証を適用し、在学中は故障時の新品交換・無償パーツ交換をさせていただきます。在学中保証については、販売店までお問い合わせください。●本カタログに記載されている全製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品の価格は、諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。●本カタログに掲載した全製品は、諸般の事情により発売中止になることがあります。●価格は全てメーカー希望小売価格です。詳細は取扱店までお問合せください。

販売名:リットマン ステススコープ 一般医療機器 届出番号:13B1X10422000218

Solventumおよびそのロゴ、Littmann、リットマン、LのLittmannロゴ、CardiologyIV、カーディオロジーIV、ClassicIII、クラシックIII、その製品名等に使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社  
メディカルサージカル事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/>

スリーエムヘルスケアジャパン合同会社はソルベンタム合同会社に社名変更しました。

Please Recycle. Printed in Japan.  
© Solventum 2025. All Rights Reserved.  
HPM-1214-A(0425)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

**0570-000-470**

9:00~17:00/月~金(土日祝年末年始は除く)